

ВЕЛТОДЕЗ	
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ	
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	0,2%-60мин;
	0,4%-30мин;
	0,75%-15мин
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1%-60мин
Протирание поверхностей (туберкулез)	1,25%-60мин
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25%-60мин
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25%-60мин
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25%-60мин
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	1,25%-60мин
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25%-30мин
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	ИМН из металлов, пластмасс, стекла:
	1%-60мин;
	ИМН из резин:
	1,25%-30мин
ПСО	ИМН без полостей, каналов, замков:
	0,2%-30мин;
	0,4%-15мин;
	ИМН прочие: 0,4%-30мин
Стерилизация	-
ДВУ	-
Дезинфекция кожных покровов	-
Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м ² ; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100мл/м ² ; 3 - расход раствора 4л/кг сухого белья; 4 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды	
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ	
Дезинфекция кувезов	1%-60мин
Дезинфекция поверхностей против плесени	1,5%-60мин
Дезинфекция воздуха	-
Дезинфекция диализной аппаратуры	-
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц	-
Дезинфекция мочи	1,25%-60мин (заливание раствором в соотношении моча:раствор 1:1)
Дезинфекция крови	1,25%-60мин (заливание раствором в соотношении кровь:раствор 1:1)
Дезинфекция мокроты	1,25%-60мин (заливание раствором в соотношении мокрота:раствор 1:1)
Дезинфекция фекально-мочевой смеси	-
Дезинфекция фекалий	1,25%-60мин (заливание раствором в соотношении фекалии:раствор 1:1)
Дезинфекция рвотных масс	-